



## Istruzioni per attivare le traduzioni del software 2WIN

Il software 2WIN è disponibile nelle seguenti lingue:

- Inglese
- Francese
- Tedesco
- Italiano
- Spagnolo
- Portoghese (BRA)

La lingua predefinita del software 2WIN è inglese.

Seguite queste istruzioni per scaricare una traduzione diversa nel vostro 2WIN:

1. Connettetevi al sito <https://www.adaptica.com/products/2win/> e navigate su Technical Information > SOFTWARE TRANSLATION
2. Scaricate il file di traduzione di interesse nel vostro PC
3. Connettete il 2WIN al vostro PC attraverso il cavo MicroUSB
4. Create una nuova cartella denominata 'TR' nella directory principale della MicroSD card
5. Copiate il file di traduzione nella cartella 'TR'
6. Rimuovete in sicurezza il dispositivo MicroSD dal vostro PC e disconnettete il vostro 2WIN dal PC
7. Riavviate il 2WIN
8. Al prossimo avvio il software del 2WIN verrà caricato con il pacchetto lingua selezionato.

Seguite queste istruzioni per tornare alla traduzione inglese predefinita:

1. Connettete il 2WIN al vostro PC attraverso il cavo MicroUSB
2. Create un nuovo file di testo chiamato '*resetTranslation.xxx.txt*' nella cartella 'TR'
3. Rimuovete in sicurezza il dispositivo MicroSD dal vostro PC e disconnettete il vostro 2WIN dal PC
4. Riavviate il 2WIN
5. Al prossimo avvio il software del 2WIN verrà caricato con la lingua inglese predefinita.