

2WIN

MANUAL da impressora IrDA



**RECURSO HERDADO OBSOLETO –
APENAS PARA COMPATIBILIDADE COM
VERSÕES ANTERIORES**

Notas de revisão

Versão de configuração do software	2WIN/2WIN-S 5.6.0
Data de publicação	2022/05/16
Versão de configuração de hardware	Versão 40.1
Código	STESK00022
Rev Num.	1.1_BR

Observações gerais

Família: ANALISADOR DE VISÃO 2WIN

Uso pretendido pela família: Instrumentos portáteis para a medição da refração binocular e monocular com base na fotorrefração infravermelha

Modelos: 2WIN, 2WIN-S, 2WIN-S PLUS


Imprimir em impressoras infravermelhas portáteis

-  Para uma descrição detalhada das funcionalidades do 2WIN e 2WIN-S, consulte os respectivos manuais.
-  Para obter mais informações sobre as funcionalidades dos botões, consulte o *Manual do Operador 2WIN*.

O 2WIN é compatível com três impressoras IrDA específicas operadas por bateria:

- 1) Fabricante GEBE – Modelo 11898 GPT-4378-Flash-79-V.24-IrDA
Compatível com a versão de software 2WIN superior a 4.1.161213
- 2) Fabricante SEIKO – Modelo dpu-s_245
Compatível com a versão de software 2WIN superior a 4.1.161213
- 3) Fabricante ZEBRA – Modelo MZ220-it

Para imprimir ou salvar os dados, pressione e segure o BOTÃO B assim que a medição terminar. Se você quiser imprimir através da impressora IrDA (Infrared Data Association) portátil opcional externa, lembre-se de apontar a máquina para a impressora de acordo com o diagrama a seguir antes de pressionar o botão.

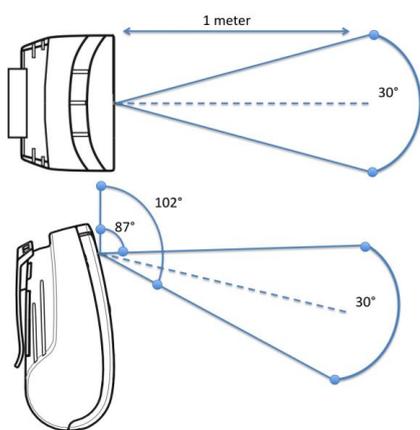

Você poderá imprimir o mesmo exame quantas vezes for necessário.

Ao imprimir na impressora IrDA, a transmissão de dados poderá ser interrompida e abortada mantendo o BOTÃO B pressionado por 1 segundo.

Configurar a impressora infravermelha

Esta página descreve como configurar manualmente as impressoras IR:

- Fabricante GEBE – Modelo 11898 GPT-4378-Flash-79-V.24-IrDA
Compatível com a versão de software 2WIN superior a 4.1.161213

A impressora é predefinida com a seguinte configuração:

- Interface: **RS232/USB/Azul** → deve ser definido em: **IrDA**
- Taxa de transmissão: **115200** → deve ser definido em: **9600**
- Fonte: **1** → deve ser definido em: **2**

Botão ON = ENTER

Botão DESLIGADO = PRÓXIMO (ou para rolar para baixo no Menu)

- Insira um rolo de papel na impressora
- Recarregue a impressora através do carregador fornecido
- Ligue a impressora pressionando o botão ON (luz verde piscando)
- Pressione OFF e ON simultaneamente: uma faixa com o Menu será impressa. Agora você precisa alterar a configuração de *Interface*, *Taxa de transferência* e *Fonte* no Menu da seguinte forma:

- Pressione ON uma vez (para alterar as configurações)
- Pressione duas vezes (até imprimir na faixa “Interface RS232/USB/Blue”)
- Pressione ON uma vez (imprime “Interface IrDA”)
- Pressione uma vez (até imprimir “Taxa de transferência 115200”)
- Pressione quatro vezes (até imprimir “Taxa de transferência 9600”)
- Pressione três vezes (até imprimir “Fonte 1”)
- Pressione ON uma vez (imprime “Fonte 2”)
- Pressione ON e OFF simultaneamente para salvar as novas configurações
- Você obtém a exibição “SETUP-FINISHED”



```
Welcome to the OPD menu 1.05
Setup timeout after 10 minutes
Actual Printer settings:

Ubat: 5.4V
Tbat: 20 C

Firmware: GE-3701

Density: 25
Speed/Quality: med (64)/low
Interface: IrDA
COM: 9600 ,n,8,Tx+
Sleep time: 1 min
Font #: 2
Char. format: 00,40,40,50,40

? Change actual setting

Press ENTER to change
Press NEXT to skip
Press ENTER+NEXT to save and exit
```

A impressora agora está pronta para ser usada.

A figura à direita exibe a configuração correta da impressora:

Informações para assistência

Para qualquer requisito de serviço, entre em contato com seu distribuidor. No entanto, você pode entrar em contato diretamente com a Adaptica em: support@adaptica.com.