



2WIN

Advanced Features

Connettività Wi-Fi

2WIN può essere connesso ad una rete Wi-Fi per:

- ✓ Utilizzare la funzione Mail Printing
- ✓ Scaricare aggiornamenti software OTA
- ✓ Scaricare file di calibrazione
- ✓ Remote Control e Telemetria

Come connettere 2WIN ad una rete Wi-Fi?


1. Accettare il disclaimer del 2WIN
2. Menu > Impostazioni > Wireless e selezionare **Attiva Wireless**
3. Menu > Impostazioni > Wireless > **Configurazione WiFi**, selezionare la rete Wi-Fi desiderata, inserire la password e premere Connect
4. Controllare lo stato del Wi-Fi dall'icona nella schermata principale di 2WIN oppure da Menu > Impostazioni > Wireless > **Stato WiFi**

Mail Printing

La funzione Mail Printing (Stampa via e-mail) permette di inviare il report PDF ad un indirizzo email. L'indirizzo email può essere personale o appartenere ad una stampante.

Come attivare Mail Printing?

1. Connettere 2WIN ad una rete Wi-Fi
2. Creare il file **mailPrinting.txt** nella SD card di 2WIN
3. Scrivere l'indirizzo email scelto nel file mailPrinting.txt
4. Riavviare 2WIN
5. Attivare l'opzione **Stampa via e-mail** da Menu > Stampa > Dispositivo > Stampa via e-mail
6. Eseguire una nuova misura e salvarla. Una e-mail con il report PDF sarà inviata automaticamente all'indirizzo e-mail specificato.

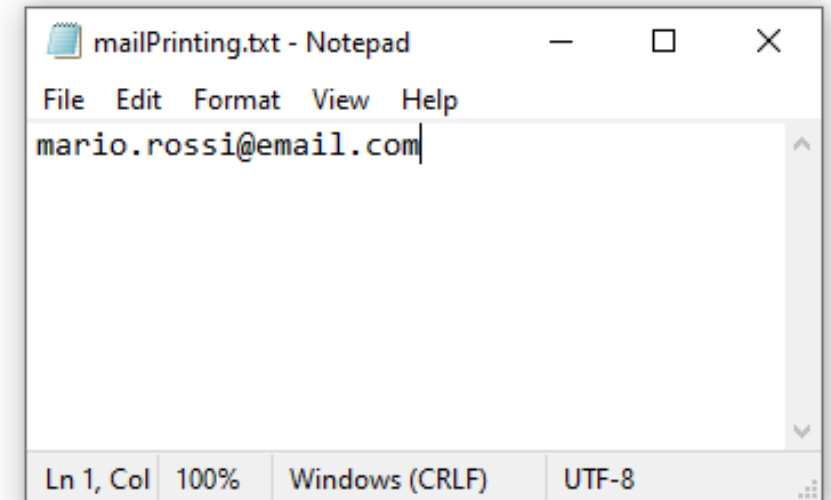

NOTA: Se si modifica l'indirizzo e-mail, occorre riavviare 2WIN.

Tabella di Screening

La Tabella di Screening di è basata sulle soglie AAPOS per i fattori di rischio dell'ambliopia.


Come visualizzare la Tabella di Screening?

Per visualizzare automaticamente la Tabella di Screening dopo ogni misura, selezionare Menu > Misurazione > Screening > **Mostra alla fine**.

Altrimenti, premere brevemente il joystick verso destra.


Come personalizzare la Tabella di Screening?

1. Creare il file **screeningTable.txt** nella SD card di 2WIN
2. Nelle prime 6 righe del file, specificare range di età e le soglie desiderate per Ipermetropia, Miopia, Astigmatismo, Anisometropia, Anisocoria e Fissazione.
3. Da Menu > Misurazione > Screening selezionare **Carica tabella dell'utente**.

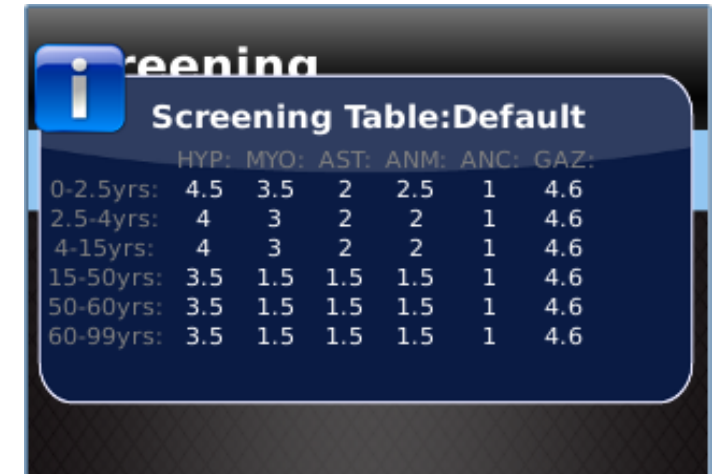

Screening Table:Default

	HYP:	MYO:	AST:	ANM:	ANC:	GAZ:
0-2.5yrs:	4.5	3.5	2	2.5	1	4.6
2.5-4yrs:	4	3	2	2	1	4.6
4-15yrs:	4	3	2	2	1	4.6
15-50yrs:	3.5	1.5	1.5	1.5	1	4.6
50-60yrs:	3.5	1.5	1.5	1.5	1	4.6
60-99yrs:	3.5	1.5	1.5	1.5	1	4.6

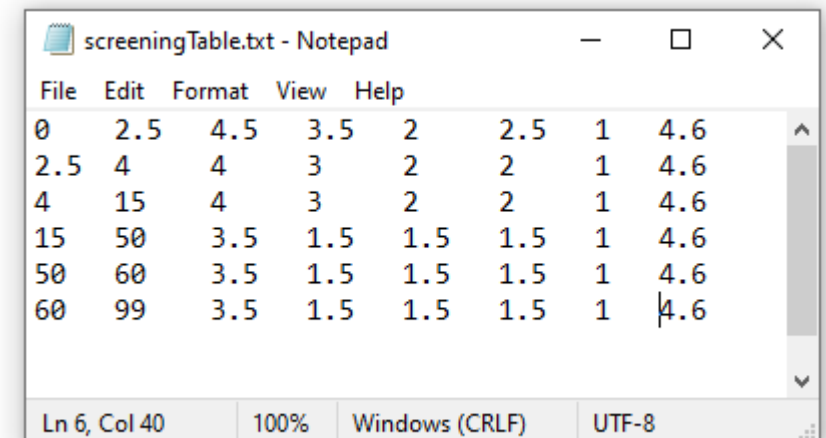


screeningTable.txt - Notepad

File	Edit	Format	View	Help				
0	2.5	4.5	3.5	2	2.5	1	4.6	
2.5	4	4	3	2	2	1	4.6	
4	15	4	3	2	2	1	4.6	
15	50	3.5	1.5	1.5	1.5	1	4.6	
50	60	3.5	1.5	1.5	1.5	1	4.6	
60	99	3.5	1.5	1.5	1.5	1	4.6	

Ln 6, Col 40 100% Windows (CRLF) UTF-8

Equivalente Sferico

2WIN permette di visualizzare il valore di Equivalente Sferico assieme ai risultati della refrazione, sia in modalità di misura che in modalità di rilettura.

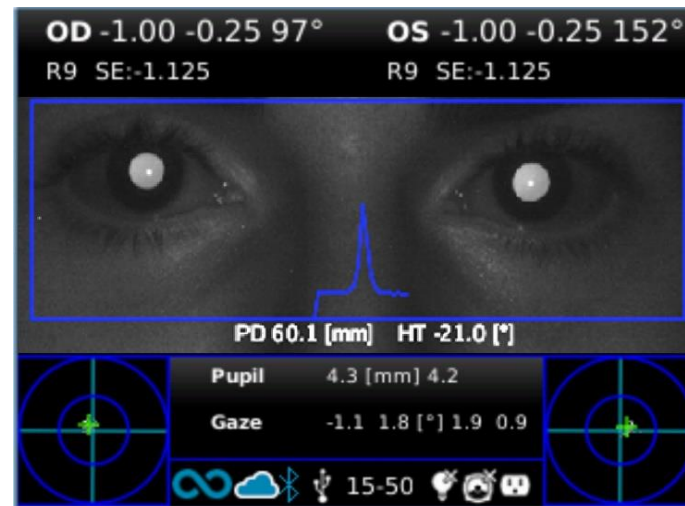

Come visualizzare l'Equivalente Sferico?

Attivare l'opzione **Spherical Equivalent** da Menu > Misurazione > Schermo > Sphe. EQ

Menu Rapido

Il Menu Rapido di 2WIN permette di avere accesso immediato alle funzioni di 2WIN preferite e più utilizzate.


Come configurare il Menu Rapido?

1. Premere a lungo il pulsante Interattività
2. Selezionare il pulsante + utilizzando il joystick
3. Scorrere il menu di 2WIN per aggiungere nuove voci al Menu Rapido

Come aprire il Menu Rapido?

Premere a lungo il **pulsante Interattività** e si aprirà il Menu Rapido. Utilizzare il joystick per selezionare la funzione da utilizzare tra quelle presenti nella lista.

NOTA: Tutte le voci del menu principale di 2WIN possono essere aggiunte al Menu Rapido.

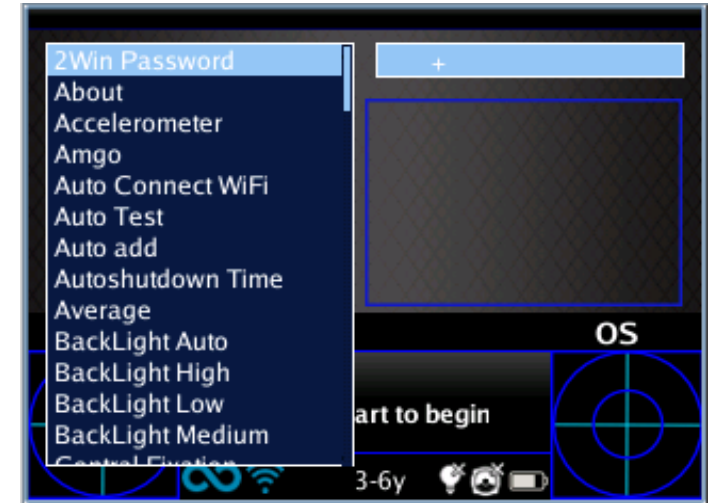

Pulsante Interattività

Centro Notifiche

Il Centro Notifiche permette di monitorare in tempo reale le attività ed i log di 2WIN.


Nel Centro Notifiche sono riportati 3 tipi di informazioni:

- ✓ Notifiche sulle **misurazioni**
- ✓ Notifiche sullo **stato del Wi-Fi** e relative connessioni
- ✓ Notifiche relative alle **Applicazioni** aggiuntive installate

Quando compare una nuova notifica, l'icona 2WIN nella barra di stato sarà illuminata con uno sfondo rosso.

Come aprire il Centro Notifiche?

Premere a lungo il **pulsante Selezione Occhio** e si aprirà il Centro Notifiche. Utilizzare il joystick per scorrere la lista di notifiche.

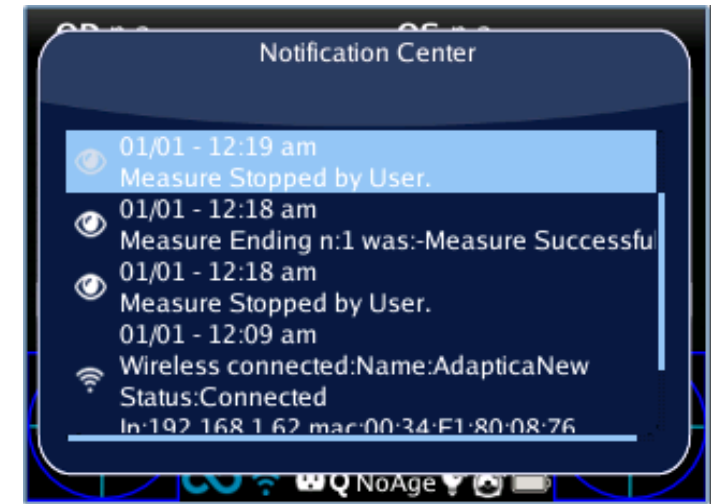

Pulsante
Selezione Occhio



Thank you!

adaptica.com
support@adaptica.com

